

# fläsh.

Zahnaufhellung  
mit Konzept.



 bluedenta

# fläsh.

## Zahnaufhellung mit Konzept

### **Erfolgsfaktor für Ihre Praxis**

Neueste Studien zeigen, dass mehr als 85% der Menschen gerne weißere Zähne hätten. Auf der anderen Seite fragen die meisten Patienten nicht aktiv nach einer Zahnaufhellungsbehandlung, wenn sie bei ihrem Zahnarzt sind.

**Das heißt aber nicht, dass Ihre Patienten nicht daran interessiert sind, das Beste aus ihrer Zahnbehandlung zu machen.**

Ihre Patienten möchten über die Möglichkeiten für ein perfektes Lächeln informiert werden. Und wenn sie von ihren Zähnen begeistert sind, teilen sie ihre Erfahrungen mit Freunden auf persönlicher Ebene sowie in sozialen Medien.

Die moderne Zahnmedizin erlaubt perfekte, naturidentische Restaurationen. Kieferorthopädische Behandlungen mit Clear Aligner Systemen geben immer mehr erwachsenen Patienten ein perfektes Gebiss. Kombinieren Sie diese Behandlungen mit einer professionellen Zahnaufhellung und Ihre Patienten erhalten zusätzlich ein strahlendes Lächeln.

Ihre Patienten nehmen Ihre Praxis als das wahr, was sie ist:

**Ein Zentrum für perfektes Lächeln.**

## Warum ist fläsh die richtige Entscheidung?

### **25 Jahre Erfahrung in Zahnaufhellung**

WHITEsmile steht seit 1994 für Zahnaufhellung „Made in Germany“. Daraus resultiert die hervorragende Qualität von fläsh.

### **Durchdachtes System**

Intuitive Bedienung und sichere Anwendung garantieren beste Erfolge.

### **Beständige Ergebnisse**

Begeistern Sie Ihre Patienten - bei jeder Behandlung.

**Überzeugen Sie sich selbst in Ihrer Praxis!  
Jetzt kostenlosen Demo-Termin vereinbaren!**



# fläsch.

## Whitening Lamp

### Intuitive Bedienung – sichere Anwendung

Neueste Hochleistungs-LED-Technologie mit einem hoch intensiven, fokussierten Lichtspektrum mit sichtbarem blauem Licht. Hohe Lebenserwartung der LEDs von mehr als 10.000 Anwendungen. Ergonomische Bedienung mit dem easy-lock System für perfekte Positionierung vor dem Patienten. Spezialeinstellungen für sensible Zähne und Einzelzahnaufhellung. Lichtoutput variierbar. Intuitive Bedienung mit Vollfarb-Touchscreen mit visueller Bedienungsanleitung. Optimale Ergebnisse mit fläsch Chairside Light Whitening Gel. Ungefährliche Arbeitstemperatur.

#### System

- fläsch Whitening Lampe,  
Hochleistungs-LED-Technologie,  
Lichtspektrum 465 nM,  
190 mW/cm<sup>2</sup>, 100–240 V
- 3 Schutzbrillen
- Zeitkartensystem für fläsch  
Zahnaufhellungsgel



**Leichte  
Positionierung**  
Gasdruckfeder

**Innovatives  
fläschcard  
System**


**fläsch.**

CE

## Touchscreen mit Farbdisplay

### 3 Aufhellungsprogramme

Konstant, Pulsierend & Einzelzahnaufhellung

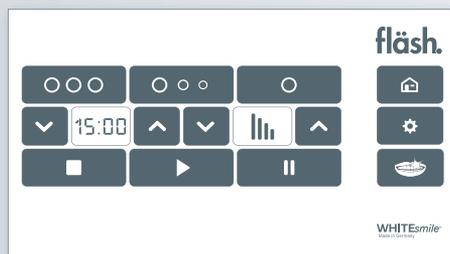


### Intuitives Arbeiten

Visuelle Bedienungsanleitung




### Anzahl Aufhellungsstufen

Bestimmung der mit dem Farbring  
gemessenen Aufhellungsstufen

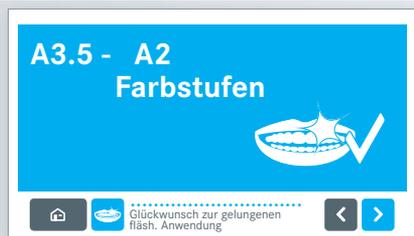

## fläschcard

Zeitmanagement System

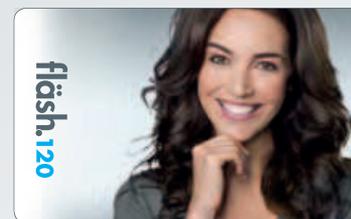

## Video

Die Behandlung – Schritt für Schritt  
[www.bluedenta.de](http://www.bluedenta.de)



# fläsch.

## Chairside

## Light Whitening

### Mit Spezialisten entwickelt – perfekte Ergebnisse

fläsch Chairside Light Whitening mit aktivem Chlorophyll für schonende und schmerzfreie Zahnaufhellung in einer Sitzung. Für Kosmetische Zahnaufhellung mit 6 % Wasserstoffperoxid (3-4 x 15 Minuten). Für Medizinische Zahnaufhellung mit 32 % Wasserstoffperoxid. (3 x 15 Minuten). Für Patienten über 18 Jahre. Medizinische Zahnaufhellung nur mit medizinischer Indikation.

Optimale Ergebnisse durch die Kombination mit fläsch Whitening Lamp. Die Behandlung kann durch nachfolgende Anwendung von fläsch Take Home Whitening intensiviert werden.



Grün eingefärbtes Gel für exaktes Auftragen



Exakte Positionierung am Lippenabhalter



Flexible Lippenabhalter für einfaches Einsetzen. **Neu: Auch in kleiner Größe erhältlich.**

- Material je Patient im 2er-Kit **LIGHT WHITENING AC** Gel in 4 g-Doppelkammer- Spritzen für 3–4 Anwendungszyklen
- **GINGIVA PROTECTOR** lichthärtend in 1,5 g-Spritzen
- **AFTER WHITENING MOUSSE** zur Desensibilisierung und Remineralisierung
- Vitamin E Öl als Lippenchutz und bei HP Flecken

- Zeitkarte mit minutengenaue Abrechnung, 60 Minuten je Gelspritze, Einzelzahnaufhellungen ohne Zeitberechnung
- fläsch Lippenabhalter, autoklavierbar
- fläsch Whitening Toothpaste, 75 ml, lime-mint Geschmack
- Erhältliche Konzentrationen:  
6 % Wasserstoffperoxid (Kosmetische Zahnaufhellung)  
32 % Wasserstoffperoxid (Medizinische Zahnaufhellung)



# fläsh.

Take Home  
Whitening

## Mit laborgefertigten Zahnschienen

- **HOME WHITENING Gel** in 3 ml-Spritzen
- **AFTER WHITENING MOUSSE** zur Desensibilisierung und Remineralisierung
- **Tiefziehfolien** zur Herstellung der Zahnschienen
- **Lichthärtender Blocker** zum Auftragen auf Zahnmodelle
- **Konzentrationen:**
  - 10 % CP (~ 3,5 % HP)  
zur Anwendung über Nacht
  - 16 % CP (~ 5,6 % HP)  
zur Anwendung über Nacht oder am Tag

CP = Carbamidperoxid  
HP = Wasserstoffperoxid

Für Patienten ab 18 Jahre.



# fläsch.

Whitening Zahnpasta  
Care & Repair

## Intensive Pflege für weißere Zähne mit 30 % Xylitol und 15 % Hydroxylapatit

fläsch Whitening-Zahnpasta ist die ideale Pflege für weiße Zähne – vor und nach der Zahnaufhellungsbehandlung. Zur täglichen Anwendung. Auch für empfindliche Zähne. Stärkt den Zahnschmelz mit Hydroxylapatit. Doppelter Kariesschutz mit Natriumfluorid und hohem Xylitolanteil. Milde Putzkörper.



- 1100 ppm Natriumfluorid, 30 % Xylitol, 15 % Hydroxylapatit.
- Ohne SLS. Ohne Triclosan. Ohne Bleichmittel.
- Geschmack: lime-mint, 75 ml.

Whitening Pen  
Tooth Whitening to go

## Zahnaufhellungstift zur Auffrischung des Weißgrads der Zähne

- 4 ml, 16 % CP (~ 5,6 % HP)
- Geschmack: mint

Für Patienten ab 18 Jahre.





# fläsh.

## Tooth Whitening App


### Zahnaufhellung – digital

Mit der neuen virtuellen fläsh Zahnaufhellungs-App können die Patienten den kosmetischen Erfolg einer Zahnaufhellung sofort selbst erleben.

- Aufhellung der Zähne anhand neuer oder bestehender Bilder aus der Smartphone Bibliothek
- Präzise und einfache Erfassung der Zähne
- Einstellbare Helligkeits-Simulation mit automatischer Erkennung von Lichtbedingungen auf Ihrem Bild
- Speichern von Fotos
- Vorher/Nachher-Vergleich
- Teilen Sie Fotos per E-Mail, Facebook oder Twitter

Und natürlich können Sie die App auch nutzen, um Ihren Patienten einen Eindruck von einer helleren Zahnfarbe zu vermitteln.

Laden Sie Ihre kostenfreie fläsh App für Android und iPhone.

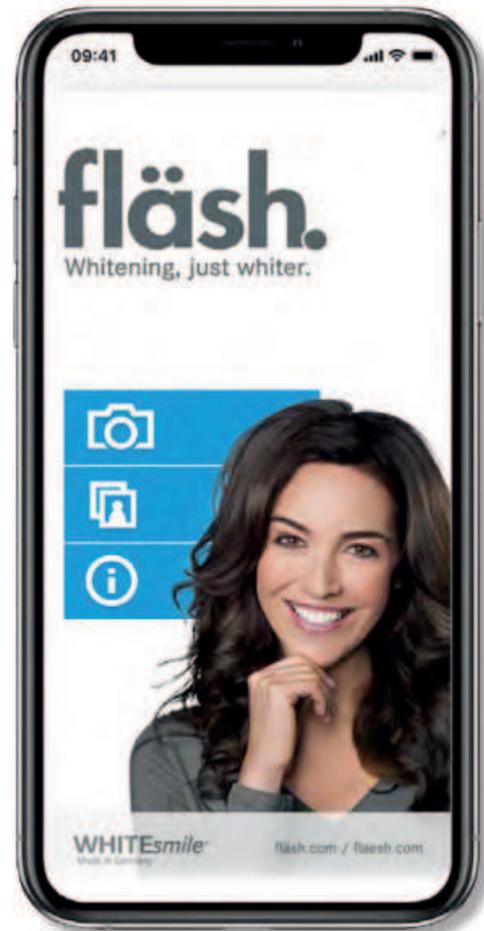

# fläsh.

Ihre Online-Visitenkarte

## fläshmap - der digitale Weg zu strahlend weißen Zähnen

Über die fläshmap können Patienten Ihre Praxis direkt online finden. Profitieren Sie von der Bekanntheit von fläsh! Dauerhafte Online-Kampagnen sorgen für stetige Aufmerksamkeit.

### Umkreissuche

Intuitive Suche nach der passenden Praxis.

### Landingpage

Individualisierte Unterseite für jede Praxis inklusive Kontaktdaten und Verlinkung.

### SEO

Automatisch verbesserte Suchmaschinenoptimierung durch Backlinks und hohe Sichtbarkeit der Website.

### Influencer

Zusammenarbeit mit einflussreichen Influencern sorgt für höheren Bekanntheitsgrad.



# fläsh.

## Patienteninformation

### Der Weg zu einem perfekten Lächeln

Eine professionelle Zahnaufhellung verleiht dem Patienten eine schönere Ausstrahlung. Zusätzlich werden durch Zahnaufhellungen andere Zahnbehandlungen aufgewertet oder krankhaft verfärbte Zähne in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt. Mit der fläsh Patienteninformation können Sie die Möglichkeiten für ein weißeres Lächeln im individuellen Fall erklären.

Zahnbehandlung und Zahnaufhellung:  
eine gelungene Kombination

Zahnaufhellung vor Zahnersatz



Für den zahnfarbenen Ersatz rekonstruiert Ihr Zahnarzt Ihre natürlichen Zähne, zum Beispiel mit Füllungen, Inlays, Kronen oder Implantaten. Der Zahnersatz lässt sich später in der Farbe nicht anpassen. Deshalb: Erst Zähne aufhellen, dann Zahnersatz in der passenden Farbe erstellen lassen. Für ein strahlend schönes Lächeln und einen ästhetischen Gesamteindruck.

Zahnaufhellung nach Kieferorthopädie



Kieferorthopädie bei Erwachsenen sorgt wieder für ein funktional korrektes, ästhetisches Zahnbild. Im Anschluss an die Behandlung erhalten Sie mit einer fläsh Zahnaufhellung in nur einer Stunde auch Ihre jugendliche, helle Zahnfarbe zurück. Für ein rundum gelungenes Ergebnis der gesamten Behandlung.

Einzelzahnaufhellung



Einzelne verfärbte Zähne können die Gesamtwirkung Ihres Lächelns und Ihrer Zahngesundheit beeinträchtigen. Mit fläsh lassen sich deshalb auch Einzelzähne aufhellen.



vorher

nachher

fläsh Patienten Broschüre

# fläsch.Dermatology

## Hyaluron Intensive Gel

NEU

### Moderne Anti-Aging Gesichtspflege

Hyaluron Intensive Gel ist ein Anti Aging Produkt für glattere Haut, geeignet zur täglichen Anwendung oder als Intensivkur. **Die Idee für ein fläsch Gesichtspflegeprodukt kam von Zahnärzten.** Die Anti Aging Gesichtspflege kann auch während der Zahnaufhellung angewandt werden und resultiert dabei in einem doppelten Effekt für den Patienten: strahlend weißes Lächeln, kombiniert mit revitalisierter, glatterer Haut.

**Wirkung statt Nebenwirkung,  
Vegan und ohne Parabene**

Hyaluronsäure ist ein körpereigener Stoff, der für den Wasserhaushalt im Bindegewebe zuständig ist. Hyaluron wird schon seit langem erfolgreich zur Unterstützung bei der Reparatur geschädigter Haut, aber auch zur Vorbeugung der Hautalterung eingesetzt. Die Weiterentwicklung von Hyaluron Intensive Gel wurde durch wissenschaftliche Studien beeinflusst, die bewiesen haben, dass die Kombination hoch- und niedrigmolekularer Hyaluronsäuren in 2,5 %iger Gel-Konzentration signifikant wirksamer in Bezug auf Feuchtigkeit, Belastbarkeit und Faltenglättung ist, als herkömmliche Hyaluron-Kosmetika. Hyaluron Intensive Gel ist nach dem international höchsten Standard zertifiziert.



30 ml, 2,5 %  
Hyaluron

Zur täglichen  
Anwendung oder  
Intensivkur.

**fläsh.**

Kontakt



**JETZT KOSTENLOSEN  
DEMO-TERMIN IN IHRER PRAXIS  
ONLINE BUCHEN**

[www.bluedenta.de](http://www.bluedenta.de)



**JETZT ANRUFEN UND INFORMIEREN**

0800 - 44 88 449

# fläsh.

Zahnaufhellung  
mit Konzept.

## Kontakt & Fragen



**bluedenta GmbH**

Alte Gasse 6  
40489 Düsseldorf  
Deutschland

Hotline: 0800 - 44 88 449

Fax: 03222 - 394 724 8

info@bluedenta.de

www.bluedenta.de

Wenn Sie etwas über Zahnaufhellung allgemein, oder über unsere Produkte erfahren möchten, fragen Sie uns einfach. Wir sind gerne für Sie da.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

## Hersteller



**WHITEsmile GmbH**

Weinheimer Straße 6  
69488 Birkenau

Version 03/2019